

坐式香薰蒸汽舱



中药熏蒸机使用说明书

一、参数

1.频率：220V、50HZ

2.最大功率2000W(共五档)：900W、1000W、1200W、1600W、2000W

3.舱体外形尺寸：153x73x132cm；

二、熏蒸机控制面板、熏蒸锅操作方法



控制面板



熏蒸锅

- 1.将水(或药液)、药包按照要求的份量，加入机器后部的熏蒸锅内，扣好锅盖。
- 2.接通电源，按下面板上的“开关”键，此时显示屏显示本机电磁炉功率1600W。
- 3.常按“定温”的“+”键，一般设定为冬天45℃，夏天40℃。
- 4.常按“定时”的“+”键，可暂时设定为60分钟，待顾客进舱后开始计时再调整时间。

三、注意事项

- 1.接通电源前，确保锅内已加药，避免干烧。
- 2.在预热时设定温度和时间，切勿一下一下的按键，以免缩短按键使用寿命。
- 3.闻到烧焦味，或有白烟冒出，可能是锅内药水不足，需马上切断电源。

四、操作技巧

- 1.机器开机时，开始可选择大功率升温(1600w-2000w)，待顾客进舱后(最好在出气前进舱)，舱内温度适宜时，可选择低功率工作(900w-1000w)，这样即安全又省药。
- 2.顾客进舱后，必需用一张100*50cm左右薄塑料布将脖子四周包住，上面再围上一块浴巾，以免药气跑出来。
- 3.熏蒸时间一般为20-40分钟，温度宜低不宜高，一般设定为冬天40-45℃，夏天37-40℃。熏蒸后当天严禁洗澡、吹风、吹空调等。
- 4.关于温度：正常情况下，实际温度一旦达到设定温度，电磁炉就会停止工作数分钟，待温度下降3-5度后电磁炉再自动启动，若顾客需要接受到药气的连续熏蒸，可以将设定温度调得更高，用900W或1000W的功率工作，这样机器就不会自动停止工作，可保持连续出气。

五、售后服务：本产品免费保修一年，终生维护。

六、故障现象及排除法

故障	可能原因	排除或解决方法
不能开机	1.电源插头（氧化、有	1.用抛光膏、酒精抛光擦

	<p>污渍) 接触不良</p> <p>2.面板控制器与电磁炉控制线未连接好</p>	<p>拭, 检查插座是否有问题</p> <p>2.检查控制器和控制线的插头与插座, 必要时重新连接一次</p>
指示灯不亮	未接通电源	检查是否通电
蒸汽不出	<p>1.温度设定低于常温</p> <p>2.时间设定为零</p> <p>3.密封锅与电磁炉接触不良</p>	<p>1.重新调节温度设定值</p> <p>2.重新调节温度设定值</p> <p>3.定期擦洗密封锅锅底与炉面</p>
不能控制	面板与控制线未良好结合	检查并重新连接控制线
有糊焦味	<p>1.锅内缺药水</p> <p>2.多次未清理锅底</p>	<p>1.检查锅内是否添加或加够药水</p> <p>2.使用三四次后清除锅内废水废渣</p>
熏蒸过程中有浓浓药味	<p>1.锅盖未扣紧</p> <p>2.舱盖未对正贴紧</p>	<p>1.扣上扣紧锅盖</p> <p>2.将舱盖与舱体对正贴紧, 个别变形漏气部位封上塑料膜。</p>
舱盖明显晃动或难以闭合有异响	<p>1.支撑杆缺少润滑</p> <p>2.合页明显损坏</p>	<p>1.给支撑杆滴上润滑油</p> <p>2.更换合页</p>

中药熏蒸使用后的十大好处

- 1、中药熏蒸对神经衰弱和失眠的好处。每天中药熏蒸，可使神经系统得到强制锻炼，调节植物神经功能，改善睡眠质量，防治失眠。
- 2、中药熏蒸可防治风湿性关节炎。中药熏蒸能促使血液循环，通络活血，祛寒消炎，排出骨关节风湿，长期熏蒸对风湿性关节炎有很好的理疗效果。
- 3、中药熏蒸可防治腿脚麻木。中药熏蒸可激活腿部神经末梢，疏通腿部经络，消除腿脚麻木，并可防治手脚冰凉。
- 4、中药熏蒸可防治高血压。中药熏蒸可有效地促进血液循环，调节内分泌系统，清除血管壁上的血脂，排出血管垃圾，增强血管弹性，促使血流通畅，从而使血压平稳。
- 5、中药熏蒸可防治糖尿病。坚持中药熏蒸可调节内分泌，使胰岛细胞康复，促进胰岛素的分泌，达到控制血糖的目的。
- 6、中药熏蒸能起到全身美容的作用。使用美容养颜类中药做中药熏蒸，可排出体内各脏腑毒素，清除皮下黑色素，能改善全身皮肤色素沉着，美白淡斑，润泽肌肤。

7、中药熏蒸的减肥效应。用减肥中药对人体进行全方位的熏蒸，全身毛孔扩张，促进皮下多余脂肪排出，从而达到减肥的目的。

8、中药熏蒸身体局部，能对妇科病、前列腺、痔疮等都有很好的防治作用。

9、中药熏蒸对腿脚肿痛、酸软无力具有很好的恢复作用。

10、经常使用中药熏蒸，可保持经络通畅、消除疲劳、预防感冒、强身健体、抗衰防老。

中药熏蒸禁忌症：

- (1) 高血压、心脏病、急性脑出血、重度贫血、动脉硬化症等患者；
- (2) 饭前饭后半小时内、饥饿、过度疲劳；
- (3) 妇女妊娠及月经期；
- (4) 急性传染病；
- (5) 有开放性创口、感染性病灶、年龄过大或体质特别虚弱的人；
- (6) 对药物过敏者。

中药熏蒸注意事项：

- (1) 中药熏蒸过程中应注意有无恶心、呕吐、胸闷、气促、心跳加快等不适，严防出汗虚脱或头晕，若有不适，立即停止熏蒸；
- (2) 中药熏蒸温度以40℃~45℃为宜；
- (3) 中药熏蒸时间每次不宜超过半小时；

- (4) 中药熏蒸治疗过程中应适当饮水；
- (5) 老人和儿童应有专人陪护；
- (6) 冬季熏蒸后走出室外应注意保暖。

注意

必须严格按照输出功率安装，保持四周通风散热，如超负荷使用，
发生火灾或温控器电子损坏本公司不责任，室内无人需拔掉电源插头

售后服务电话13724868039